

ТЕСТ - ПОЛОСКИ Ширмера



Офтальмологические тест-полоски для пробы Ширмера. В упаковке 100 тест-полосок в индивидуальной упаковке. Тест-полоски необходимы для определения уровня слезопродукции и постановки диагноза — синдром сухого глаза. Полоски изготовлены из особенной фильтрованной бумаги 0.5 см шириной при длине 4-5 см.

Порядок обследования

Оттяните нижнее веко пациента немного вниз и одновременно аккуратно поместите короткий загнутый конец тестовой полоски короткую (согнутую на шаге 1) за нижнее веко (ориентировочно посередине между медиальным и латеральным углом глаза), таким образом, чтобы короткий конец уткнулся в свод.

Пациенту следует закрыть глаза. Целесообразно одновременное проведение пробы на обоих глазах. Через 5 минут извлеките полоску и измерьте длину увлажненного участка от линии сгиба.

Оценка результатов

Нормальные показатели — смачиваемость тест полоски более 15 мм за 5 мин.

Незначительно сниженные — от 10 до 15 мм за 5 мин.

Умеренно сниженные — от 5 до 10 мм за 5 мин.

Выраженное снижение показателей — менее 5 мм за 5 мин.

СПЕЦМЕДПРИБОР